

Biatain Ag hælaumbúðir með límanti

Stærð
19x20

Magn
5 stk.

Vörunúmer
9643

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
Sími: 520-4316 / 4326
Netfang: coloplast@icepharma.is



www.coloplast.dk

WC0015

Notendaleiðbeiningar



Biatain Ag hælaumbúðir

Biatain - Ag


1. Ábendingar

- 1.1 Til meðferðar á vessandi þrýstingssár á hæl þar sem framgangur ságræðslu er hægur eða enginn.
- 1.2 Má nota á þrýstingssár sem eru illa lyktandi og sýkt undir eftirliti læknis eða hjúkrunarfræðings.
- 1.3 Má nota fyrirbyggjandi til að koma í veg fyrir sýkingar

2. Notkunarleiðbeiningar: Biatain Ag hælaumbúðir

- 2.1 Hlífðarfilman á miðjum umbúðunum er fjarlægð (mynd 1). Haldið um hanskaævnu flípana til að tryggja sterila ásetningu.
- 2.2 Umbúðirnar eru eins og ör í laginu. Örin er látin vísa að tánnum. Umbúðirnar beygðar í 90° milli örvaroddsins og endans (mynd 2).
- 2.3 Umbúðirnar eru fyrst festar neðan á fætinum og síðan er örvarendinn festur upp eftir hælnum (mynd 3).
- 2.4 Hlífðarfilman er tekin af öðrum hvorum hanskaævna flípanum og límkanturinn festur þannig að svamphlutarnir nái saman eða skarist (mynd 4).
- 2.5 Klemmið hornið saman til að loka umbúðunum (ef þess gerist þörf). Endurtekið hinum megin (mynd 5).

3. Umbúðir fjarlægðar

- 3.1 Umbúðir togaðar eftir húðinni í átt frá sárinu með annarri hendi og á sama tíma er haldið við umbúðirnar með hinni. Þannig teygist á límkantinum og hann losnar frá húðinni án þess að særa hana.
- 3.2 Sárið skolað eftir þörfum (þar sem ekki myndast gel undir umbúðunum er ekki þörf á jafn ítarlegri hreinsun eins og þar sem gel myndast undir umbúðum).
- 3.3 Nýjar umbúðir settar á.

4. Tíðni skiptinga

- 5.1 Skipt er um umbúðir eftir þörfum.
- 5.2 Má vera á sárinu í allt að 7 daga.

5. Athugasemdir

- 5.1 Má nota undir þrýstingsumbúðir
- 5.2 Umbúðir ber að fjarlægja fyrir langtíma geislameðferð.
- 5.3 Má ekki nota með hypoklorit lausnum (t.d. kloramin) eða vetnisperoxíði.
- 5.4 **Biatain Ag** hælaumbúðir geta valdið litabreytingum í sárinu sem hverfa auðveldlega við hreinsun sársins.

6. Geymsluskilyrði

- 8.1 Geymist lárétt við stofuhita.

Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4



Mynd 5

