

Biatain Ibu		
Stærð	Magn	Vörunúmer
5x7	5 stk.	4105
10x10	5 stk.	4110
10x20	5 stk.	4112
15x15	5 stk.	4115
20x20	5 stk.	4120
Biatain Ibu Soft-Hold		
Stærð	Magn	Vörunúmer
10x10	5 stk.	4140
10x20	5 stk.	4142

Nánari upplýsingar veita hjúkrunarfræðingar



Lyngháls 13, 110 Reykjavík
Sími: 520-4316 / 4326
Netfang: coloplast@icepharma.is



WC0122

Notendaleiðbeiningar



Biatain Ibu
Biatain Ibu Soft-Hold

Biatain - Ibu
 **Coloplast**

1. Ábendingar

- 1.1 Til meðferðar á miðlungs til mikið vessandi sárum sem verkja t.d. fótasár, þrýstingssár, fótasár sykursjúkra, 2. stigs brunasár, gjafasvæði eftir húðflutning, skurðsár og húðfleiður.
- 1.2 **Biatain** Ibu svampumbúðir henta sérstaklega vel þar sem húð umhverfis er viðkvæm.

2. Notkunarleiðbeiningar: Biatain Ibu og Biatain Ibu Soft-Hold

- 2.1 Stærð umbúða valin við hæfi. Umbúðirnar eiga að vera 2 sm stærri en sárið. Hægt er að klippa umbúðirnar til í hentuga stærð.
- 2.2 Munstraða hliðin með **Biatain** Ibu nafninu snýr frá sárinu.
- 2.3 Umbúðir eru festar með festiumbúðum.

3. Festiumbúðir

- 3.1 Val á festiumbúðum er háð ástandi húðar umhverfis sárið og þörfum sjúklingsins.
- 3.2 **Biatain** Ibu umbúðir er hægt að festa með **Stabilon** filmu, grisju/sárabindi, plástri eða líku.

4. Tíðni skiptinga

- 4.1 Skipta ber um umbúðir 3. – 4. hvern dag, eftir því hve mikið vessar og hvernig almennt ástand sársins er.
- 4.2 Má vera á sári í allt að 7 daga.

5. Umbúðir fjarlægðar

- 5.1 Sárið skolað með volgu vatni eða saltvatni. Húðin umhverfis sárið þerruð.
- 5.2 Nýjar umbúðir settar á.

5. Athugasemdir

- 6.1 Má nota undir þrýstingsumbúðir.
- 6.2 Umbúðir ber að fjarlægja fyrir langtíma geislameðferð.
- 6.3 Má ekki nota með hypoklorit lausnum (t.d. kloramin) eða vetnisperoxíði.
- 6.4 Má nota á sár sykursjúkra og sýkt sár undir eftirliti læknis eða hjúkrunarfræðings.

6. Geymsluskilyrði

- 6.1 Geymist lárétt við stofuhita.